


取扱説明書


【保証書付】この度は、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取り扱い説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。また、本書は、保証書も兼ねています。必ずお手元に大切に保管ください。

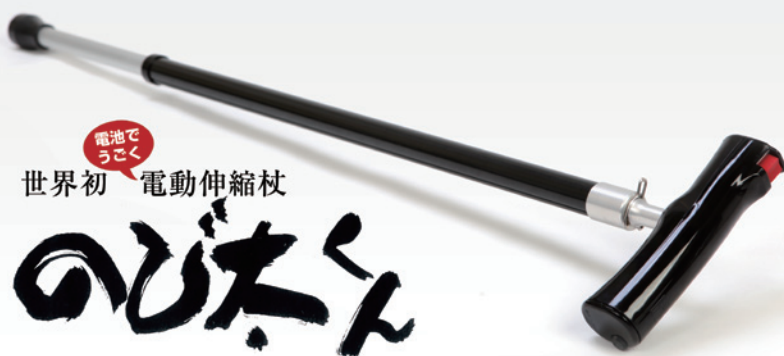


安全にご使用いただくために

警告

故意に強い衝撃を与えないでください。本製品は精密部品で構成されています。伸縮動作の不良や故障の原因となります。

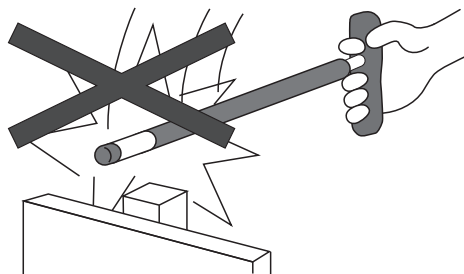

本製品の改造・分解は絶対にしないでください。正常に作動しなくなる恐れがあります。また、重大な事故につながる恐れがあります。

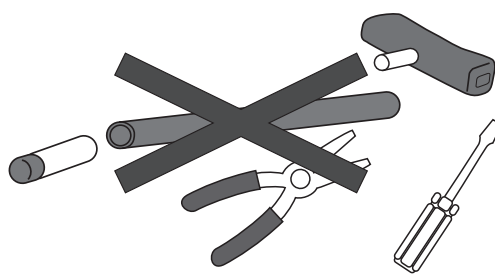

故障かな?と、思ったら

- ストロークエンド(最伸長、最収縮点)で起動しないときは、杖先で地面を軽くたたいてください。
- 反転動作のとき、すぐに動かないときは1秒以上間を開けてから再起動してください。
- 動きが極端に遅くなったり、スイッチを押してもすぐに動かなくなったら電池を交換して下さい。

※ 注意

棒状杖は、杖なしで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。

- 杖なしで歩行できない方やリハビリ中など、体重の一部を支えないと歩行できない方は使用しないでください。(但し医師の指導のもとでの使用は除く。)
- 使用前に必ず各部の動作確認をし、異常がないことを確認した後、ご使用ください。
- 杖先のゴムが摩耗や劣化によって傷んできた場合は早めに取り替えてください。
- 濡れた路面は滑り易いため注意してご使用ください。(杖は真っ直ぐに立て、斜めにはつかない。)
- 凍った路面では転倒の危険があるので、使用しないでください。
- 道路の側溝の溝や凹がある箇所では、杖先がはまりこむ恐れがあるため、十分注意してください。
- 指定用途以外(例えば、登山用、トレッキングポール、護身用など)には使用しないでください。
- 焚き火など、火気のある場所での使用はしないでください。
- お出かけ前に必ず電池の確認をしてからご使用ください。


保守、管理方法についての注意点

- 杖先ゴムを洗浄する時は、中性洗剤を使用し水洗いしてください。
- 高温になる車内などでの保管は避けてください。
- 小さな子供の手が届く場所には保管しないでください。


使用上の注意

- 本品は精密部品で構成されています。激しく倒すと故障の原因になります。
- 使いはじめ直ぐ動かない時はスイッチを左右交互に押してください。
- 使用電池は必ずアルカリ単三電池またはニッケル水素充電式電池を使用してください。
- 体重をかけて最縮長にすると、スイッチを押しても伸びなくなることがあります。その場合は杖先で地面を強くたたいてください。
- 暑い車内や炎天下に放置しないでください。高温になると電池が破損し、故障の原因となります。
- 車内放置などで杖が熱くなっている時は、特にグリップ下の金属部分が高温になりますので、火傷に注意してください。
- 固定側、移動側いずれのパイプもへこむと伸縮できなくなります。杖で机などを叩いたりしないでください。

本体の名称及びセット内容

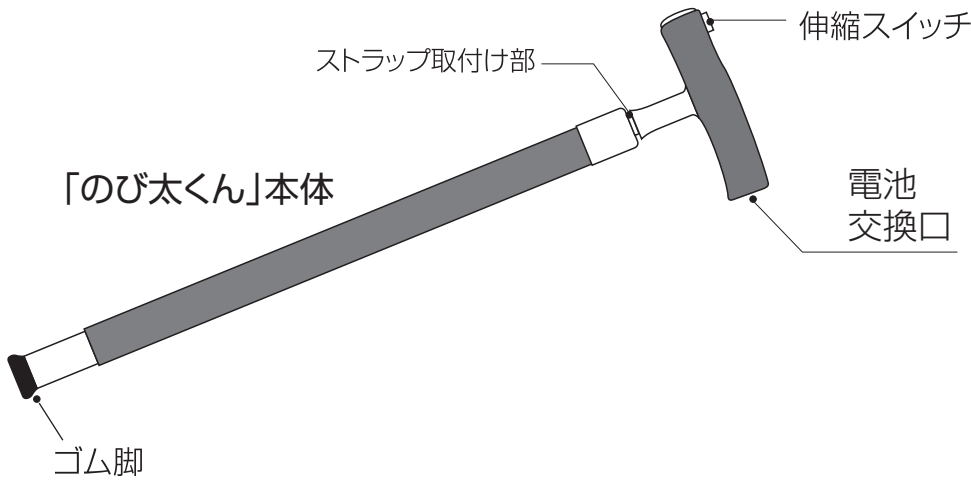

●杖の長さについて
(平地の場合)
杖の先を足先の前20cmに置き、ひじは30°~40°屈曲した位置にくるように杖をつく状態が、杖の長さの目安となります。また、階段などの段差のある場所では、スイッチを押して適切な長さに調節してください。

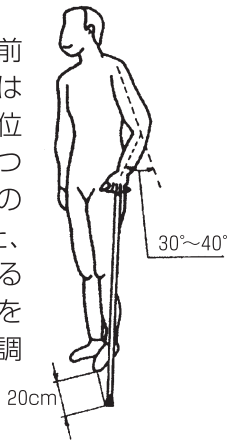

電池交換方法



●フタを開ける
グリップ後ろのツマミを緩めます。
※電池蓋の最上部を左手の親指で押さえながらツマミを反時計方向に回します。



●単三電池を交換
フタを開け単三電池を入れます。
※向きに注意、グリップ部分に表示があります。

★電池蓋がグリップから外れたら下方のピンをグリップの下に押し込んで下さい。

使用方法



●杖の長さを調節
スイッチの右を押すと杖が伸び、左を押すと縮みます。
※本製品は立ち上がりを補助する杖ではありません。伸縮させる時は杖の先端を浮かせた状態で行ってください。故障の原因になります。

仕様

■本体

全長	約60cm~100cm
垂直耐荷重	約100kg
グリップ長さ	約150mm
重量	約420g
乾電池	アルカリ単三 2本
固定パイプ	アルミ
移動パイプ	アルミ
グリップ	ポリカーボネート
付属品	ゴム足 1ヶ

保証書

品番	保証期間	お買上げ日より 1年間
お買上げ日	年 月 日	
販売店		

※保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
●保証期間内でも次の場合は有料となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買上げ後の落下等通常使用時以外による故障及び損傷。
(ハ) 盗難、紛失、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常気象による故障及び損傷。
(ニ) 本書の提示がない場合。
(ホ) 本書のお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字を書き替えられた場合。
(ヘ) 消耗品に関しては保証対象外になります。

ITK (株) アイ・ティー・ケー
〒501-6225 岐阜県羽島市正木町新井230
Tel.058-393-0780 Fax.058-392-6126
URL <http://www.itk-pro.com>

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。